



## ノマド社製 マッサージテーブルのお買い上げありがとうございます！

### マッサージテーブルの使用方法

- ご使用の際はラッチを外し半分ほど開けて下さい。折り込まれている脚を押し開くかハンドルを使いながらテーブルを開くことで脚が自動的に開きます。テーブルを直立に起してください。  
(ベッド下面のワイヤーがフレームやネジなどに絡まっていると水平に開かなかつたりしますので、ワイヤーの状態を確認の上、開いて下さい。)  
起した後はテーブルの片方を持ち上げケーブルが真っ直ぐになるよう調整してください。
- 各脚のグリップノブを外してお好みの高さに外脚を調整した上で再度グリップノブを締めてください。全てのグリップノブがしっかりと締められているか、高さが全て合っているかお確かめ下さい。

### マッサージテーブルのケアの方法:

- 6ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直してください。
- 風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。
- 生地を痛める恐れがあるため、寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。テーブルを車内に放置、保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長時間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースやカバーをご利用下さい。また、**生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシーツやパッドをご使用下さい。**
- お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから、必ず柔らかい布で湿気を拭き取ってください。
- 強いアルコール(エタノールを含む)など化学クリーナーや薬品の使用はレザーの生地を傷める場合がありますので、使用しないで下さい。

### 保証について:

ノマドテーブルは、最初のテーブルの所有者が製品を保持されている場合、フレーム(木製の躯体、脚)で生涯(製造中止後は5年間)、マット部分のレザーの縫製とフォームで3年、付属品のヘッドレスト、アームレストは1年の保証があります。(レザーは保証対象外となります)

但し、お客様の不注意、過失、事故、不適切な取扱い等による不具合には同保証は適応されませんのでご了承下さい。

※保証適用の可否は当社の判断によります。当社は上記の内容を事前通知なしに変更する権利を有します。なお、メーカーの保証が適用となる場合、品物はお客様にて当社までお持込みとなります。宅配便等でお送りいただく場合の送料はお客様のご負担となります。予めご了承下さい。

Nomad Therapeutic Tables Inc.  
QC Canada

ノマド社 正規日本総代理店 ラベンダーヒル 東京都荒川区町屋 8-4-19 (株)ティー・エム・クリエイション  
電話 03-3810-7050 ファックス 03-5848-7221

ノマドマッサージテーブルのご使用方法

## 【1】 マッサージテーブル本体のご使用方法



マッサージテーブル本体の組み立ては簡単に出来ます！  
ドライバー等の工具は一切必要ございません。



1. 留め金を外し、テーブルを開きます。
2. ヘッドレスト等のアクセサリを取り出し、テーブルと脚を 180 度を開きます。



※ 脚にワイヤーが絡まっていないか注意して下さい。

3. ベッド本体を起こします。  
ベッドの片端を両手で持つか、ハンドルを持って起こしてください。  
このとき、足でベッド脚を固定しながら起こしましょう。



安全のため、留め金は必ず閉じてください。

高さ調節は、脚部分のノブを回し、脚を取り外して行います。  
お好みの高さに取り付け、ノブをしっかりと閉めて下さい。（ノブはフェルト側が内側になります。）



## 【2】 ヘッドレストのご使用方法

### (1) アジャスタブルヘッドレストの使用方法について (NOMAD COMPACT、SUMO、OSTEO 標準装備)



1. 上の左側の写真のように、ヘッドレストの土台を置きます。
2. 右側についているレバーを手で持ちます。  
時計の12時から3時の方向に、レバーを水平に動かします。
3. 2本の棒をベッドの側面の穴に差し込み、角度を調整して、止めたい場所でレバーを締めます。  
ヘッドレストの土台についているマジックテープと、ヘッドレストのクッションについているマジックテープとでクッションを固定し使用します。

ヘッドレストの抜き差しは、必ずレバーを緩めた状態で行ってください。

※ ヘッドレストの荷重は15kgまでとなっております。体重をかけるようなことはお控えください。

### (2) アジャスタブル&リトラクタブルヘッドレストのご使用方法(NOMAD PRO、NOMAD SPA 標準装備)



1. 上の左側の写真のように、ヘッドレストの土台を置きます。
2. 右側についているレバーを手で持ちます。  
時計の12時から3時の方向に、2つのレバーを水平に動かします。

3. 2本の棒をベッドの側面の穴に差し込み、角度、高さを調整して、止めたい場所でレバーを締めます。  
ヘッドレストの土台についているマジックテープと、ヘッドレストのクッションについているマジックテープとでクッションを固定し使用します。

ヘッドレストの抜き差しは、必ずレバーを緩めた状態で行ってください。

※ ヘッドレストの荷重は15kgまでとなっております。体重をかけるようなことはお控えください。

### 【3】 ベッドの脚の高さ微調整用ネジは必ず締めて下さい。(NOMAD SPA、NOMAD PRO 標準装備)

ベッドを置く床が平らではないときや、安定しない時は、このネジで微調整することが可能です。



### 【4】 サイドアームレストのご使用方法

(24インチ、26インチ幅のテーブル以外では別売りのオプション品)



1. サイドアームレスト(肘置き)は、ベッドサイドの穴に取り付けてお使い下さい。  
取り外す際は、少し斜めにするマジックテープが外れやすく簡単です。  
※ ベッド本体のモデルによって、サイドアームレストと段差が発生する場合がございます。  
※ サイドアームレストの荷重は 20kgまでとなっております。体重をかけるようなことはお控えください。