



必ずお読み下さい

ラベンダーヒルのオリジナルマッサージテーブルのお買い上げありがとうございます！

マッサージテーブルの使用法

- ご使用の際はラッチを外し半分ほど開けて下さい。テーブルの後ろ側に立ち、脚を押し開くハンドルを使いながらテーブルを開くことで脚が自動的に開きます。テーブルを直立に起して下さい。起した後はテーブルの片方を持ち上げケーブルが真っ直ぐになるよう調整して下さい。
(ベッド下面のワイヤーがフレームやネジなどに絡まっていると水平に開かなかったりしますので、ワイヤーの状態を確認の上、開いて下さい。)
- 各脚のグリップノブを外してお好みの高さに外脚を調整した上で再度グリップノブを締めてください。全てのグリップノブがしっかりと締められているか、高さが全て合っているかお確かめ下さい。

マッサージテーブルのケアの方法:

- 約6ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直して下さい。
- 風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。
- 生地を痛める恐れがあるため、極端に寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。テーブルを車内に放置、保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長時間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースをご利用下さい。また、生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシーツやパッドをご使用下さい。
- お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから、柔らかい布で必ず湿気を拭き取ってください。

保証について:

ラベンダーヒルのオリジナルマッサージテーブルはフレーム(ベッドの木製躯体)で3年間の保証があります。

但し、お客様の不注意、過失、事故、不適切な取扱い等により発生した不具合には同保証は適応されませんので予めご了承下さい。保証の範囲はマッサージテーブルを安全にご使用いただくために障害になる問題に限定されております。マット部分、木製部分の木のふし、ご利用に差し支えない木のへこみ、小さな傷などは保証の適用外となります。

同保証はご購入されたご本人所有の場合に限定されます。

当社は上記の保証内容を事前通知なしで変更する権利を有します。

誤送・製品の初期不良における取扱い

この度は弊社よりラベンダーヒルのオリジナルマッサージテーブルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。万全の注意を払い、出荷しておりますが、誤送・製品に不良等ございましたら、お手数ですが**必ず商品到着後1週間以内**にお買い上げいただきました販売店様までご連絡下さい。以後の対応はできかねますのでご了承下さい。また、事前連絡なき返品・交換はお受けできませんのでご注意下さい。

製造メーカー: Shanghai Sintang Industrial 社 正規日本代理店
株式会社 ティー・エム・クリエイション

〒116-0001 東京都荒川区町屋 8-4-19 03-3810-7050 Email info@lavenderhill-japan.com

[1] マッサージテーブル本体のご使用方法

マッサージテーブル本体の組み立ては簡単に出来ます！ ドライバー等の工具は一切必要ございません。




1. 留め金を外し、テーブルを開きます。
2. ヘッドレスト等のアクセサリ*を取り出し、テーブルと脚を 180 度を開きます。
*マッサージテーブルの種類により異なります



3. ベッド本体を起こします。 ベッドの片端を両手で持つか、ハンドルを持って起こしてください。
このとき、足でベッド脚下を固定しながら起こしましょう。 脚にワイヤーが絡まっていないか注意して下さい。



4. 安全のため、留め金は必ず閉じてください。

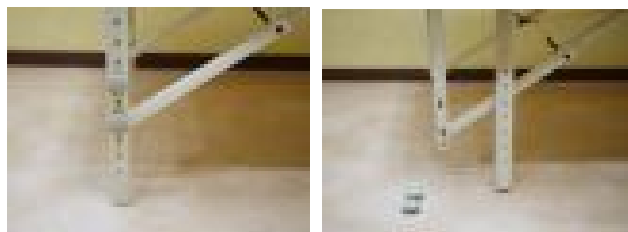


5. 高さ調節は、脚部分のノブを回し、脚を取り外して行います。
お好みの高さに取り付け、ノブをしっかりと閉めて下さい。
ベッド本体を立ち上げ後、アクセサリ類を取り付けます。

[2] ヘッドレストのご使用方法




1. 上の左側の写真のように、ヘッドレストの土台を置きます

- 右側についているレバーを手で持ちます。
時計の12時から3時の方向に、レバーを水平に動かします。
- 2本の差し込み棒をベッドの側面の穴に差し込み、角度、高さを調整して、止めたい場所でレバーを締めます。
土台についているマジックテープと、クッションについているマジックテープとでクッションを固定し使用します。

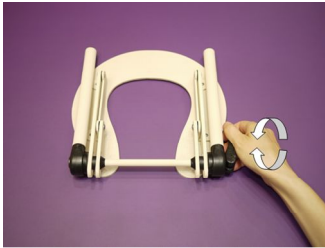


レバーは固定した状態で時計回りに回すと閉まり、反時計回りに回すと緩みます。
極端に回しすぎないようにご注意ください。
また、固定を解除した状態では絶対に回さないようにしてください。

[3] アームレストのご使用方法

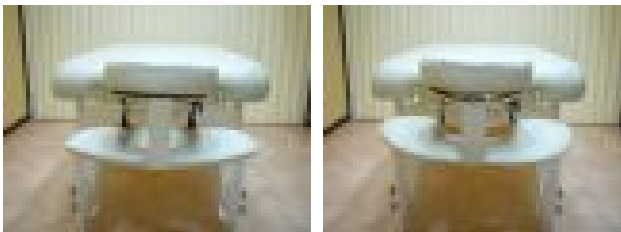

アームレスト取り付け完成図

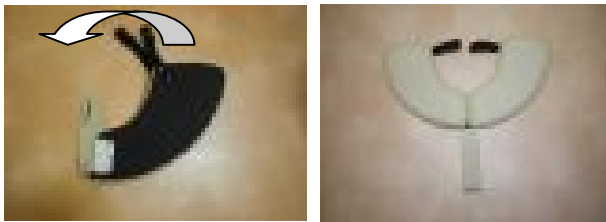

- アームレストは本体を広げます。
(スプリームフレックス、スプリームポータブルEXCのみ)



- アームレスト上にヘッドレストを置き、ヘッドレストの差し棒に黒テープの輪を差し込みます。
- 2の状態ヘッドレスト土台をベッド本体に差し込みます。



4. ベルトをヘッドレスト土台に通しマジックテープで固定します。

[4] アームスリングのご使用方法




アームスリング取り付け完成図



1. アームスリング上にヘッドレストを置き、黒テープの輪の中にヘッドレストの差込棒を入れます。



2. 1の状態ヘッドレスト土台をベッド本体に差し込みます。

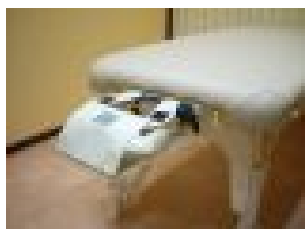

3. アームスリング本体をヘッドレスト外側からマジックテープで固定します。

[5] 保証書について

ラベンダーヒルのオリジナルマッサージテーブル製品については、保証書はメーカーより特に用意されておりませんが、当社にて製品毎についているシリアルナンバーにてお客様のユーザー登録及び管理をいたしております。テーブルのマット裏側に貼ってありますシリアルナンバーが印字されているシールを含めシール類は決して剥がさないで下さい。

万一、製品に不具合があった場合には、通常の保証の開始手続きとして、製品の現物をお持込みいただく前に、シリアルナンバーの入ったシールの写真画像、不具合の箇所の写真をお送りいただいております。

写真画像を拝見して、保証の可否を決定させていただきます。

尚、保証適用の際は、当社まで製品をお客様にてお持込みいただけますよう、お願い申し上げます。

宅配便利用にかかる送料はお客様のご負担となります。 予めご了承下さい。