



## ノマド社製 マッサージテーブルのお買い上げありがとうございます！

### マッサージテーブルの使用方法

- ご使用の際はラッチを外し半分ほど開けて下さい。折り込まれている脚を押し開くかハンドルを使いながらテーブルを開くことで脚が自動的に開きます。テーブルを直立に起してください。  
(ベッド下面のワイヤーがフレームやネジなどに絡まっていると水平に開けなかつたりしますので、ワイヤーの状態を確認の上、開いて下さい。)  
起した後はテーブルの片方を持ち上げケーブルが真っ直ぐになるよう調整してください。
- 各脚のグリップノブを外してお好みの高さに外脚を調整した上で再度グリップノブを締めてください。全てのグリップノブがしっかりと締められているか、高さが全て合っているかお確かめ下さい。

### マッサージテーブルのケアの方法：

- 6ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直してください。
- 風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。
- 生地を痛める恐れがあるため、寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。テーブルを車内に放置、保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長時間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースやカバーをご利用下さい。また、**生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシーツやパッドをご使用下さい。**
- お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから、必ず柔らかい布で湿気を拭き取ってください。
- **強いアルコール（エタノールを含む）など化学クリーナーや薬品の使用はレザーの生地を傷める場合がありますので、使用しないで下さい。**

### 保証について：

ノマドテーブルは、最初のテーブルの所有者が製品を保持されている場合、フレーム（木製の躯体、脚）で一生涯（製造中止後は1年間）、マット部分のレザーの縫製とフォームで3年、付属品のヘッドレスト、アームレストは1年の保証があります。（レザーは保証対象外となります）

但し、お客様の不注意、過失、事故、不適切な取扱い等による不具合には同保証は適応されませんのでご了承下さい。

※保証適用の可否は当社の判断によります。当社は上記の内容を事前通知なしに変更する権利を有します。

なお、メーカーの保証が適用となる場合、品物はお客様にて当社までお持込みとなります。宅配便等でお送りいただく場合の送料はお客様のご負担となります。予めご了承下さい。

Nomad Therapeutic Tables Inc.

QC Canada

ノマド社 正規日本総代理店 ラベンダーヒル 東京都荒川区町屋 8-4-19 (株)ティー・エム・クリエイション  
電話 03-3810-7050 ファックス 03-5848-7221